

mini-Screw Remover

骨内で破折したスクリューを
簡単・安全・確実に摘出できる器具です。



ドライバーハンドル SDH



特 徴

高い操作性

骨内で破折したミニスクリーウの上部よりスクリーウリムーバーのブレードを押し当てて、左回り（反時計回り）に回転を続けると、スクリーウリムーバーの特殊ブレードが骨内で破折したスクリーウをキャッチし自然と破折したミニスクリーウを摘出することができ、折損時の患者様の負担を最小限にできます。



寸 法

リムーバーの先端ブレードは破折したスクリーウの口径に応じて下記よりお選びください。

（下記以外のスクリーウ径に対応するものもごさいますので、ぜひ弊社までご相談ください。）

unit : mm

mini-Screw Remover	スクリーウ径
FSR 12D / 12E	1.15mm ~ 1.20mm
FSR 13D / 13E	1.25mm ~ 1.40mm
FSR 15D / 15E	1.45mm ~ 1.60mm
FSR 17D / 17E	1.65mm ~ 1.80mm
FSR 20D / 20E	1.95mm ~ 2.05mm

※ スクリューはメーカーを問いません。ハンドピースに装着して使用するショートタイプもあります。

医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000006