

# 01

補綴

Prosthetics

イージークラウンリムーバー

## ECR *Easy Crown Remover*

クラウン等の補綴物を撤去する際、  
補綴物の咬合面に小さな穴をあけるだけで撤去を可能にした器具です。  
支台歯への負担を抑えるだけでなく、補綴物を再利用可能な状態で取り外せます。

単冠に限らず。  
最小限の穴だけ。



※販売名:クラウンコア リムーバー 医療機器製造販売届出番号:12B1X10014000023

# ECR

Easy Crown Remover  
— イージークラウンリムーバー —

ECR

標準価格(税別) お問い合わせください

〈構成〉・メタルリムーバー\*  
1.6mm径 ..... 4本  
1.8mm径 ..... 2本  
・スペーサー\* ..... 2本

・ラチェット\* ..... 1本  
・専用ケース ..... 1台

○カーバイドバーは付属しません。

## 特 徴

歯肉損傷のリスクを軽減

過剰な歯質の削合を回避可能


金属粉による不快感、誤飲リスクを軽減

TEKとしての再利用も可能

補綴物を大きく壊すことや、支台歯への負担が抑えられます。  
撤去した補綴物はテンポラリーとして使用することも可能です。

## 使用手順


1

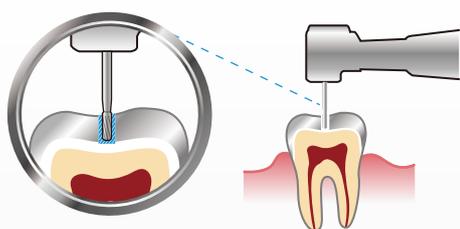

バー

除去用カーバイドバーにてアクセスホールを形成。  
○こちらのバーは付属していません。


2

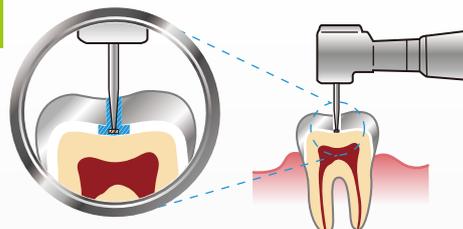

スペーサー

スペーサーで作業部を確保。


3

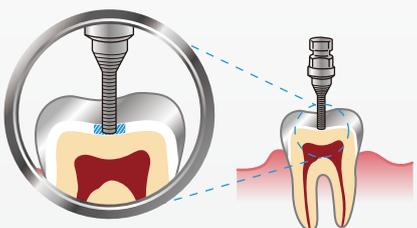

メタルリムーバー

メタルリムーバーを装着。

4

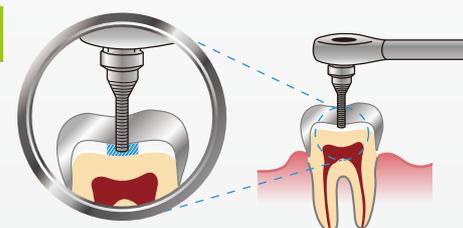

ラチェット

ラチェットを用いて取り外す。



臨床動画公開中  
QRコードから動画に  
アクセスできます。



クラウン除去



インレー除去



ブリッジ除去

ロングスパン  
ブリッジ除去