



# Free-100 mini

歯科用吸引装置

## Forest-one

株式会社フォレスト・ワン

当社従来品 (Free-100) と  
比較すると約 **11 cm**  
小さくなりました!

サイレント  
機能搭載

高周波領域の  
騒音を低減

外来環・か強診  
適用機器



2種類のフード  
(O型フード・アルミニウムフード)を付替可能

オプションでL型フードもご用意しております

L型フード



12段階の  
パワーモード搭載



操作性よく  
スムーズに動きます



# 性能は変わらずさらにコンパクトに

## 3種類のフィルタ構造

1. 集塵フィルタ
2. HEPAフィルタ  
0.3 $\mu$ mの粉塵を99.97%以上捕集します
3. 排気フィルタ  
診療室内への排気をクリーンにします

## フィルタ交換時期お知らせ機能付

フィルタの交換時期になるとランプが光るので  
吸引力が落ちる事なく快適にご使用いただけます

## 電氣的安全テスト合格済み

■ マスク、グローブ等の感染防護を行い、取扱説明書に従って実施してください。モータが過負荷にならないようアラームに従って交換します。

- (1) フィルタ警報ランプが最初に点灯したとき、集塵フィルタを交換します。
- (2) フィルタ警報ランプが2回点灯したら、すべてのフィルタを交換してください。

※HEPAフィルタは3ヶ月での交換が推奨されます。

モータの耐用時間は使用状況、連続使用時間等によって異なります。1,000時間使用したモータは、販売代理店または製造販売業者へお問い合わせください。

# POWÄCOM

パワフル & コンパクト

POWER (吸引力) と COMPACT (軽量性) を  
兼ね備えた技工用の小型吸引装置。  
操作・組立もカンタン。



レスト付きボックス装着時

(サイズ) レスト付きボックス：W402×D354×H236mm  
本体+レスト付きボックス：W402×D354×H362mm  
○ボックスはオプション品となります。



1

### POWERFUL

小型で軽量、  
だけどパワフル。  
吸引力は7段階に  
調節可能。

2

### COMPACT

約3kgの本体に  
2つのフィルター内蔵。

3

### EASY

工事不要で設置が簡単。  
また、お手入れも簡単で、  
中にたまったゴミを  
捨てるだけ。

4

### CLEAR

LEDライトで  
作業部が見やすい。

5

### HEPAフィルタ

HEPAフィルタ搭載で  
綺麗な空気を排出。





院内にも馴染みやすい  
スッキリとしたデザインです



◀◀ Free-100miniの  
詳しい情報はこちらを  
ご確認ください。



◀◀ POWACOMの  
詳しい情報はこちらを  
ご確認ください。

■お問い合わせ先

## Forest-one

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階・5階  
TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106 MAIL/info@forest-one.co.jp  
<https://www.forest-one.co.jp/>



Forest-one  
公式サイト