

Forest-one

こどもから大人まで対応した
アライナー矯正



GalaxyAlign®

ギャラクシーアライン

[15歳以下の特別なプランがあります]

GalaxyAlign®
Kids 2-2

GalaxyAlign®
Kids 5-5

GalaxyAlign®


Galaxy Alignは、
プレオルソ^{※1}治療後のアライメントをはじめ、
こどもから大人まで対応した、これからのアライナー矯正



治療です。

Galaxy Alignのプラン紹介

患者さんのライフステージに合わせたご提案ができます

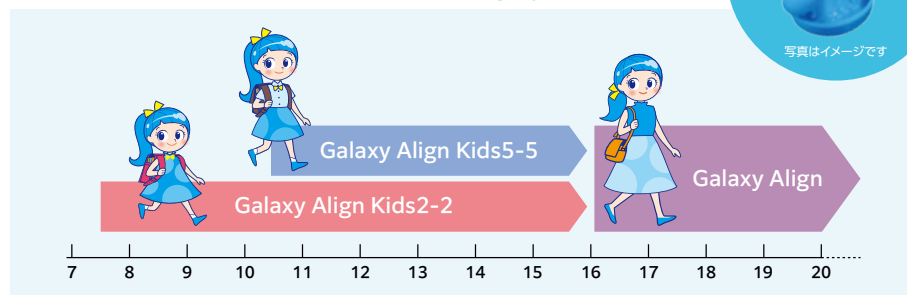

可愛いケース付き



写真はイメージです

15歳以下の患者向けプラン

プレオルソによって治療をされた小児患者に対して
「もう少しだけ歯ならびを整えたい」というようなケースに向けたプラン

Galaxy Align Kids5-5

萌出途中の場合を考慮した設計で、治療途中での印象採得後に新しいステップのアライナーの作製が可能です。
治療開始年齢が15歳以下の特別なプランとしてご用意しています。

適応歯列 5-5

推奨条件

- ・第1大臼歯萌出後
- ・15歳まで

GalaxyAlign®
Kids5-5



Galaxy Align Kids2-2

混合歯列期における前歯2-2の部分で、出来る限り短い期間でアラインメントすることを目的として作られたプランです。永久歯萌出途中である、混合歯列期に対応するためのシステム設計をおこなっています。

適応歯列 2-2

推奨条件

- ・前歯2-2完全萌出
- ・犬歯、第2大臼歯完全萌出前
- ・dental age IIIA期
- ・15歳まで

GalaxyAlign®
Kids2-2



16歳以上～成人患者向けプラン

5-5を治療されたい方に向けたプラン
お子さんがプレオルソ・Galaxy Alignを治療中の場合は親子割もあり

Galaxy Align

5-5を治療する16歳以上～成人患者向けのプランです。
お子さんがプレオルソ、もしくはGalaxy Alignを治療中の患者さんに向けた、親子割もご用意しています。

適応歯列 5-5

推奨条件

- ・16歳以上～成人

GalaxyAlign®



Galaxy Alignシステムのご紹介

Galaxy Alignの主な特徴

Feature point
01

治療経過を確認しながら
進められるよう、7ステップ毎に
印象採得及び治療計画を確認


Feature point
02

アタッチメント、クリアボタン、
顎間ゴムを用いた「捻転」「挺出」
「圧下」にも対応した設計

Feature point
03

把持力を高めるための
歯肉まで覆うトリムライン

適応症例

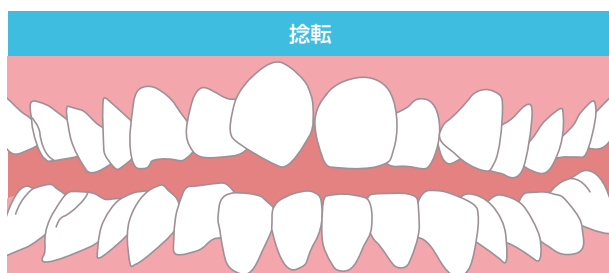


治療計画

上顎

14ステップ

下顎

11ステップ

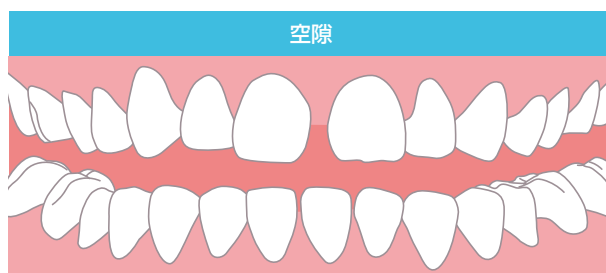


治療計画

上顎

16ステップ

下顎

10ステップ

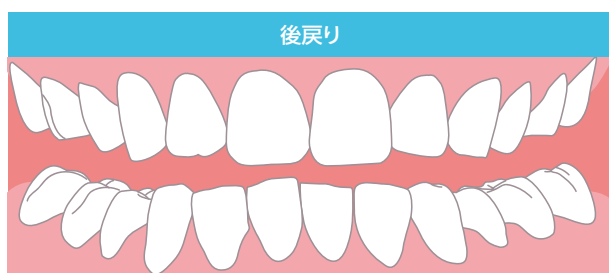


治療計画

上顎

7ステップ

下顎

7ステップ

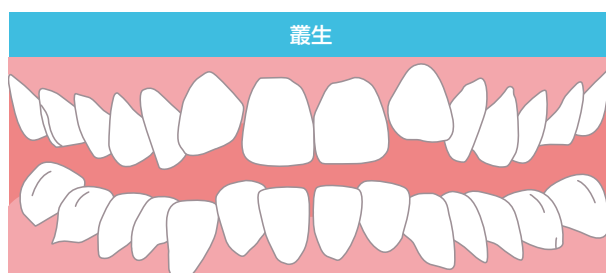

治療計画

上顎

16ステップ

下顎

15ステップ

使用例

1. 空隙の閉鎖 (4mm以下)
2. 叢生の改善 (軽度～中等度)
3. 交叉咬合の改善
4. 軽度のOpen biteの改善 (前歯の挺出)
5. 軽度のDeep biteの改善 (前歯の圧下)
6. 上顎前歯の唇側傾斜の改善
7. 矯正治療後の後戻りに対する再治療
8. インプラントや補綴のための準備矯正 (アププライト、スペースリゲイン)

非推奨例

1. 大きな空隙の閉鎖症例 (6mm以上)
2. 重度叢生
3. 重度の骨格性Ⅱ級・Ⅲ級、骨格性アシメトリー
4. 臼歯の圧下・挺出
5. 小臼歯抜歯症例…歯牙の平行移動は困難
6. 臼歯の捻転の改善

☆Galaxy Alignでは、下記の指針に則り、なおかつサポートドクターと協議した症例のみを適応症としています。

日本矯正歯科学会の治療指針より抜粋

【推奨される症例】

- ①非抜歯症例で、以下の要件を満たす症例
 - ・軽度の空隙を有する症例
 - ・軽度の叢生で歯列の拡大により咬合の改善が見込まれる症例
 - ・大きな歯の移動を伴わない症例
- ②矯正治療終了後の後戻りの改善症例
- ③抜歯症例であっても歯の移動量が少なく、かつ傾斜移動のみで改善が見込まれる症例
- ④金属アレルギーを有する症例

【推奨されない症例】

- ①抜歯症例
 - ・犬歯が過心傾斜している症例
 - ・前歯部が大きく舌側傾斜している症例
 - ・歯の大きな移動を必要とする症例
 - ・大きな回転、圧下・挺出を必要とする症例
 - ・患者の協力度が低い症例
- ②乳歯列期、混合歯列期で顎骨の成長発育や歯の萌出の正確な予測が困難な症例
- ③骨格性の不正を有する症例

* 公益社団法人 日本矯正歯科学会 平成29年2月27日発行 アライナー型矯正装置による治療指針

Galaxy Alignオーダーフロー


Galaxy Alignのオーダーはオーダー管理システムから行います

1 導入セミナーの申込 2 ログイン 3 システム内の操作

導入セミナーお申し込み後、一週間ほどにて、オーダー管理システムのIDとパスワードが発行されます。

メールにて送られるURLからオーダー管理システムにアクセスし、発行されたIDとパスワードにてログインください。

データのアップロード、ラボとのやり取り、患者管理、必要資料のダウンロードなどがシステム内で全ておこなえます。

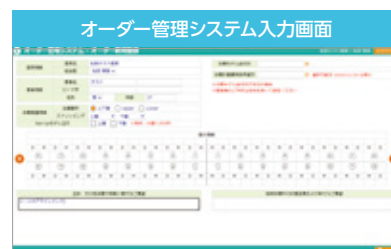

オーダーについて 新規オーダー前に必要資料をご準備ください。

新規オーダー時に
必要な資料

- 口腔内スキャンデータ or 石膏模型
- 口腔内写真
- 顔貌写真
- パノラマ写真

* 口腔内スキャンデータに関しては、スキャナの種類を問わないオープンシステムです。

Galaxy Alignの充実したサポート体制

- ✓ Galaxy Alignに精通した歯科技工士が作製
- ✓ 臨床経験豊富な歯科衛生士の在籍
- ✓ 上記の歯科技工士・歯科衛生士によるフォロー
- ✓ 日本国内に設置した歯科技工所による生産・出荷
- ✓ Support Doctorによるサポート

導入後も安心して運用できる体制を充実させています。初めてオーダーいただく際のフォローアップなども積極的におこなっておりますので、システム操作の疑問点なども含め、お気軽にご連絡ください。



Galaxy Align 導入セミナーのご案内

フォレスト・ワンでは、正しい使い方をマスターして目指す結果を得るために、Galaxy Alignの導入にあたってはセミナーを受講いただいています。セミナーを受講希望のお客様は弊社までお問い合わせいただくか、弊社公式サイトよりお申し込みください。

セミナーの主な内容

- ・アライナー矯正とは？
- ・Galaxy Alignでの矯正治療
- ・矯正治療を成功させるポイント
- ・IPR（ディスキングについて）
- ・保定について
- ・Galaxy Align オーダーフローについて 等

目指すゴールのために
導入セミナーの
お申し込み方法

下記のURLもしくは右のQRからアクセスし
必要事項をご記入の上、お申し込みください。

Web www.forest-one.co.jp/galaxyalign-order



当セミナーは有料のWeb配信（録画）です。
お申し込み後、数日以内に視聴用URLとパスワードをお送りいたします。

Galaxy Align 症例紹介

プレオルソ^{※2}とGalaxy Alignを併用した症例

症例1

初診時患者情報

年齢 9歳

性別 男

主訴 叢生・上顎前突

症例提供：大内仁守先生（おおうち矯正歯科・小児歯科クリニック 院長）



1 初診
プレオルソ タイプI S
使用開始



2 9ヶ月後
プレオルソ タイプI S
使用後



Point

- 叢生の改善
- 上顎前突の是正

GalaxyAlign
Kids 2-2



3 Galaxy Align
Kids2-2
Set開始時



More

- 上顎歯軸の遠心傾斜
- 正中スペースの空隙



4 Galaxy Align
Kids2-2
約3ヶ月後




Point

- 上顎歯軸の遠心傾斜改善
- 正中スペースの空隙閉鎖

合計：8ステップ

『こどもの歯ならび矯正システム^{※2}』 治療の流れ

それぞれの最適年齢の時期

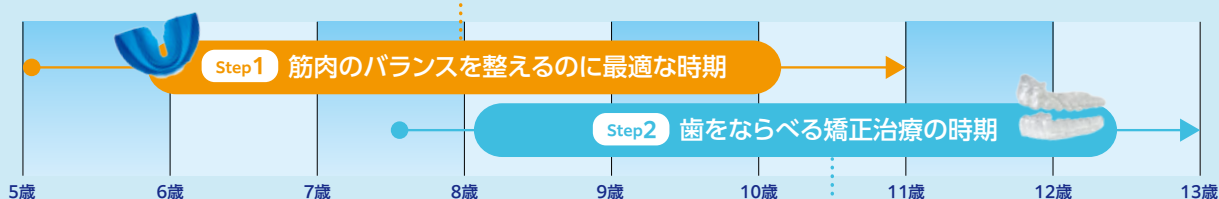

◎治療の年齢・タイミングは例です。実際の治療方針については患者さんによって異なります。



症例2

初診時患者情報

年齢 11歳 性別 男 主訴 上顎前歯の捻転

症例提供 : Galaxy Align User

GalaxyAlign
Kids 2-2



1
プレオルソ使用後
アライナー使用開始時



GalaxyAlign
Kids 2-2



2
2ヶ月後
8ステップ装着後



GalaxyAlign
Kids 2-2



3
3ヶ月後
アライナー治療終了



合計 : 14ステップ

*上顎1番の捻転量が大きく、通常のKids2-2プラン（7ステップ）ではおさまらなかったため、Kids2-2プランを2回おこない治療を完了しました。



Step 1 プレオルソでお口の周りの筋肉を整えて歯をならべていく

1日中着けなくてOKな
柔らかくて着けやすいマウスピース装置

対象年齢 5歳～永久歯が生え揃うまで

Point 1 着けるのは
家にいるときの1時間と
寝るときだけでOK！

Point 2 柔らかくて
違和感が少ないので
続けやすい！



Step 2 Galaxy Alignで歯ならびを整える

透明で目立ちにくく
取り外しが可能なマウスピース装置

対象年齢 7歳半～

Point 1 透明で目立ちにくいので
口元を気にせず
日常生活に支障がでにくい

Point 2 取り外しができるので
歯磨きもしやすく
衛生的



※2 ごちらの装置やシステムについてはセミナー内容には含まれておりません。

関連商品のご案内

SDCシリーズ (スイス製)

ProLign

アライナー矯正に重要なIPR (Interproximal Enamel Reduction: 隣接面エナメル質の削合)。ProLignは正確で安全、チェアタイムの短縮などドクターと患者双方の負担を減らすツールです。

正確


厚みによる
サイズ選択のみ

時間短縮

コントラを使用した
IPR

安全

触れても軟組織を
損傷しない

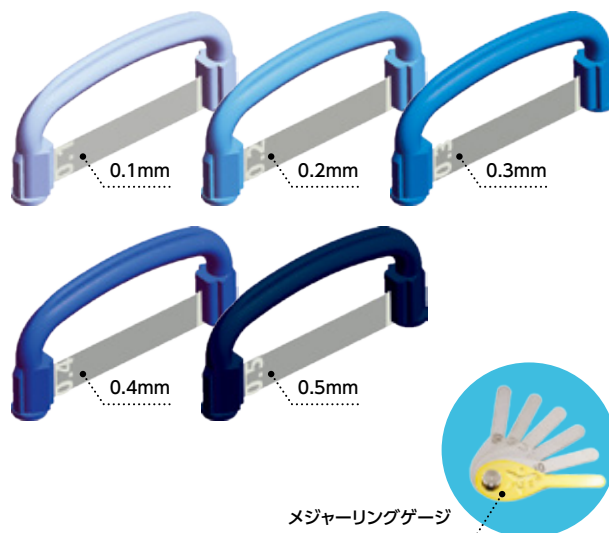

クリンチェックで指示のあった隣接面の幅をより正確に削合するため、ダイヤモンド粒子を精密にコーティングしたブレードには厚みが表記してあります(5サイズ)。

指示された幅のサイズのブレードが隣接面に挿入できればIPRは終了です。

販売名: Gファイルシリーズ/一般的名称: 歯科研削用ストリップ/
医療機器分類: 一般医療機器/医療機器製造販売届出番号: 12B1X10014000014

ProLignとメタルストリップの違い

ProLign

- チェアタイムの短縮
- 均一に削合できる操作性の良さ
- 振動が少なく、注水不要なため患者さんのストレス軽減
- 軟組織損傷のリスク軽減
- ✗ EVAタイプのコントラが必要

メタルストリップス

- EVAタイプのコントラが不要
- ✗ 削合に時間がかかる
- ✗ 均一に削合することが難しい
- ✗ 振動が大きい

患者さん用アライナー装置補助ツール (韓国製)

KSAMED チューイー

計画通りに歯牙を動かす為には、アライナーをしっかりフィットさせなければなりません。治療に重要なツールです。



お問い合わせ

Forest-one 株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階
Tel. 047-474-8105 E-mail. info@forest-one.co.jp

Webサイトはこちら

URL www.forest-one.co.jp



LINEで
お問い合わせはこちら

ID Forest-one

