

ミニスクリーリムーバー

mini-Screw Remover

骨内で破折したスクリーを簡単・安全・確実に摘出できる器具です。

ミニスクリーの
メーカーを
問いません。

コントラ接続タイプも
あります。



■mini-Screw Remover 商品一覧

商品名	標準価格(税別)
ドライバーハンドル	お問い合わせください
ドライバー用 ミニスクリーリムーバー*	お問い合わせください
コントラ用 ミニスクリーリムーバー*	お問い合わせください


○スクリーの径に対応するタイプは右ページをご確認ください。

*販売名:バイオマテリアルズ スクリューリムーバ 医療機器製造販売届出番号:12B1X10014000006

特 徴

高い操作性

骨内で破折したミニスクリューの上部よりスクリューリムーバーのブレードを押し当てて、左回り（反時計回り）に回転を続けると、スクリューリムーバーの特殊ブレードが骨内で破折したスクリューをキャッチし自然と破折したミニスクリューを摘出することができ、折損時の患者様の負担を最小限にできます。

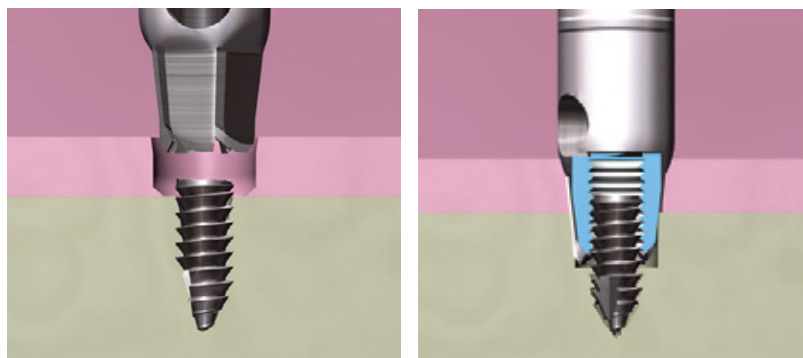

寸 法

リムーバーの先端ブレードは破折したスクリューの口径に応じて下記よりお選びください。
(下記以外のスクリュー径に対応するものもございますので、ぜひ弊社までご相談ください。)

mini-Screw Remover		スクリュー径
ドライバーに装着して使用するタイプ	コントラに装着して使用するタイプ	
FSR 12D	FSR 12E	1.15mm～1.20mm
FSR 13D	FSR 13E	1.25mm～1.40mm
FSR 15D	FSR 15E	1.45mm～1.60mm
FSR 17D	FSR 17E	1.65mm～1.80mm
FSR 20D	FSR 20E	1.95mm～2.05mm

○スクリューはメーカーを問いません。

Luce Bracket®

MSE I / MSE II

mini-Screw Remover

IPR用ストリップス

アライナー矯正用ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM

小児用抜歯鉗子

Luce2×4

プレオルソX