

IPR用ストリップス

安全で正確かつ低侵襲な矯正歯科治療に必須のツールです。

厚みが一定となるように、研削ブレード面にダイヤモンド粒子を精密にコーティングして、正確な隣接面研削を可能としています。

矯正歯科治療および

アライナー治療に最適な“新しい”ツールです。

Kit



Starter Set “S7” ※

標準価格(税別) お問い合わせください

- 〈構成品〉・ProLign 両面コーティング
(0.10/0.20/0.30/0.40mm) 各1本
・ProLign 片面コーティング
(0.10/0.20mm) 各1本
・UltraSoft 1本
・シャンク 7個

Starter Set “S4” ※

標準価格(税別) お問い合わせください

- 〈構成品〉・ProLign 両面コーティング
(0.10/0.20/0.30/0.40mm) 各1本
・シャンク 4個

アライナー治療に最適なゲージが入ったミニキット。



Mini Kit Ortho ※

標準価格(税別) お問い合わせください

- 〈構成品〉・ProLign 両面コーティング
(0.10/0.20/0.30/0.40mm) 各1本
・ProLign 片面コーティング
(0.10/0.20mm) 各1本
・CombiStrip : UF+F 各1本
・Measuring gauge5 ゲージ5種
・シャンク 5個

Luce Bracket®

MSE I / MSE II

mini-Screw Remover

IPR用ストリップス

アライナー矯正用ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM

小児用抜歯鉗子


Luce2×4

プレオルソX


単品

ProLign シリーズ

■両面コーティング

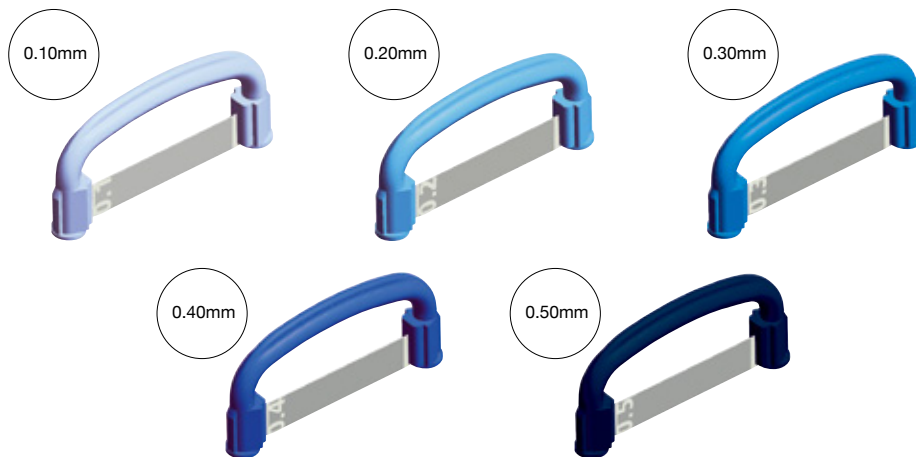

■片面コーティング

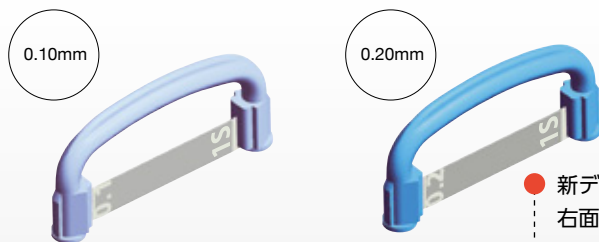

● 新デザインのシャンクの取り付け部位で、右面または左面として使い分けができます。



New attachment system

新デザインのシャンクの取り付け部位で、右面または左面として使い分けができ、また、厚みサイズの異なるProLignを使う際に、ハンドピースから取り外す手間を省きます。

■ProLign 商品一覧

商 品 名	数 量	標準価格 (税別)
ProLign 0.10mm (両面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.20mm (両面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.30mm (両面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.40mm (両面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.50mm (両面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.10mm (片面コーティング)*	3本	お問い合わせください
ProLign 0.20mm (片面コーティング)*	3本	お問い合わせください
シャンク (補充用)*	40個	お問い合わせください

○ProLignは、シャンクが各3個付きます。

※販売名: Gファイルシリーズ 医療機器製造販売届出番号: 12B1X10014000014

Luce Bracket®

MSE I / MSE II

mini-Screw Remover

IPR用ストリップス

アライナー矯正用ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM

小児用抜歯鉗子

Luce2×4

プレオルソX

特 徴

New ProLign Strips

New tools for Aligner Systems and fixed orthodontics

アライナー矯正に必須のIPR (Interproximal Enamel Reduction : 隣接面エナメル質の削合)。
ProLignは正確で安全、チェアタイムの短縮などドクターと患者双方の負担を減らすツールです。

正 確

厚みによる
サイズ選択のみ

時間短縮

コントラを使用した
IPR

安 全

触れても軟組織を
損傷しにくい



治療過程で指示のあった隣接面の
幅をより正確に削合するため、ダイ
ヤモンド粒子を精密にコーティン
グしたブレードには厚みが表記し
てあります (5サイズ)。

指示された幅のサイズのブレード
が隣接面に挿入できればIPRは
終了です。

ProLignとメタルストリップスの違い

	メリット	デメリット
ProLign	1. チェアタイムの短縮 2. 均一に削合できる操作性の良さ 3. 振動が少なく、注水不要のため患者さんのストレス軽減 4. 軟組織損傷のリスク軽減	1. EVAタイプのコントラが必要
メタルストリップス	1. EVAタイプのコントラ不要	1. 削合に時間がかかる 2. 均一に削合することが難しい 3. 振動が大きい 4. 軟組織損傷のリスク

Luce Bracket®

MSE I / MSE II

mini-Screw Remover

IPR用ストリップス

アライナー矯正用ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM


小児用
抜歯鉗子

Luce2×4


プレオルソX

使用方法

① 取り付け

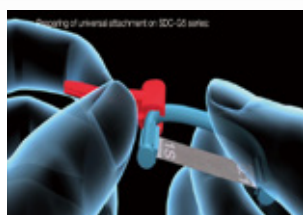


シャンクの取り付け

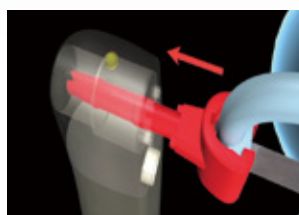

ハンドピースへの取り付け

② IPR開始

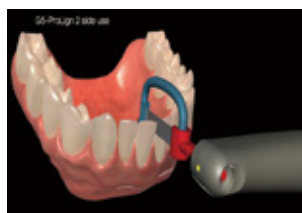

③ 取り外し




使用上のポイント

IPRの幅による使用手順



コンタクトがきつくブレードが入らない場合

薄いブレードから使用し、徐々に厚いものを入れてください。
コンタクトにウェッジ等を入れるとブレードの挿入が容易になります。
先に別の隣接面のIPRを行うなど、
総合的に診断し無理なくご使用ください。

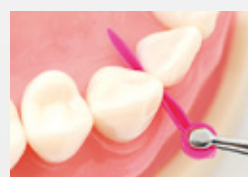

Luce Bracket®

MSE I / MSE II

mini-Screw Remover

IPR用ストリップス

アライナー矯正ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM

小児用
抜歯鉗子

Luce2×4

プレオルソX

その他
単品

UltraSoft



プロラインでの削合後

UltraSoftでの研磨を推奨します。

削合のみではカリエスリスクも高まるため、削合後は隣接の研磨を推奨しております。

研磨専用のブレード UltraSoft は非常に薄く、隣接部のグロス研磨に優れており、隣接面エナメル質の研磨に効果的です。

UltraSoft®

標準価格(税別) お問い合わせください

〈数量〉 ・UltraSoft …… 3本
・シャンク …… 3個

ProStrip



“ProStrip(プロストリップス)”は、ダイヤモンド粒子サイズ(平均)が、それぞれ15 μ m、25 μ m、40 μ mのものが研削面にコーティングされています。

○上記数値は、ブレード部の厚みではありません。

■ProStrip 商品一覧

商品名	数量	標準価格(税別)
ProStrip 15 μ m®	3本	お問い合わせください
ProStrip 25 μ m®	3本	お問い合わせください
ProStrip 40 μ m®	3本	お問い合わせください

○両面・片面とあります。 ○シャンクが各3個付きます。

メジャーリングゲージ



隣接面の幅を正確に測ることができるゲージ。
9種類のサイズ(厚み)があり大変便利なツールです。

メジャーリングゲージ®

標準価格(税別) お問い合わせください

Luce
Bracket®

MSE I /
MSE II

mini-
Screw
Remover

IPR用
ストリップス

アライナー
矯正用ツール

ENA HRI

FUSION5


POWACOM

小児用
抜歯鉗子

Luce2×4

プレオルソX

CombiStrip

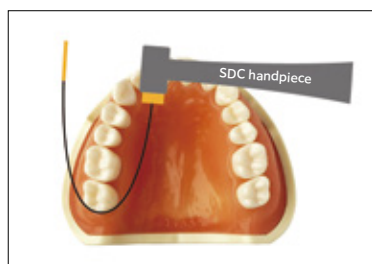

CombiStrip Fine*

標準価格(税別) お問い合わせください

Grid	fine	Strip height	2.5mm
------	------	--------------	-------

〈構成〉・Fine 3本
・シャンク 2個

“手動”とコントラによる“電動”の、 2つのオペレーションモード

隣接部のグロス研磨に優れており、エナメルやコンポジット、セメントの研磨にも効果的です。さらに、隣接面研削後にできる隅角を取るのに、理想的なツールです。コンポジットやセメントのオーバーハングを取り除く際にも適しています。

CombiStrip Kit*

標準価格(税別) お問い合わせください

〈構成〉・Ultra-Fine 3本
・Fine 3本
・シャンク 6個



CombiStrip Ultra-Fine*

標準価格(税別) お問い合わせください

Grid	Ultra-Fine	Strip height	2.5mm
------	------------	--------------	-------

〈構成〉・Ultra-Fine 3本
・シャンク 2個

※ 販売名: Gファイルシリーズ 医療機器製造販売届出番号: 12B1X10014000014

Kavo ハンドピース



EVAタイプのコントラについて

ProLignシリーズおよび各ストリップを使用するには回転式ではなく、上下運動式(PMTCプロフィン/EVAチップ用)のコントラが必要になります。(メーカーは問いません)

Kavo社のエキスパートマティック、ナカニシ社のTi-Max X55などをご用意ください。上下運動式のコントラはIPRだけでなく、難しい隣接面や根面のPMTCにも使うことができます。

販売名: エキスパート マティック 医療機器製造販売届出番号: 223AIBZX00039000

Kavo ハンドピース (エキスパートマティックE61C)

標準価格(税別) お問い合わせください

●ProLignシリーズのKitとハンドピースのお得なセット販売もございます。
詳しくはお問い合わせください。

Luce
Bracket®

MSE I /
MSE II

mini-
Screw
Remover

IPR用
ストリップス

アライナー
矯正用ツール

ENA HRi

FUSION5

POWACOM

小児用
抜歯鉗子

Luce2×4

プレオルソX